



DESCRIPTIF GENERAL ET MATIERES

- Solution ophtalmique **stérile**
- 99.1% Eau stérile et 0,9 % Chlorure de Sodium (correspond aux larmes des yeux).
- Flacon de 200 ml

AVANTAGES SPECIFIQUES

- Flacon avec une **œillère ergonomique** facilitant le **rinçage de l'œil**, et un couvercle anti-poussière et des instructions claires.
- Disponible en recharge de stations ou en usage unique.

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

- **Pour la décontamination simple** (saletés, copeaux divers, poussières)
- **Mode d'emploi par pictogramme sérigraphié et miroir sur le support.**
- Temps de péremption : 3 ans après la date de fabrication indiqué sur chaque flacon
- Idéal pour **ateliers, halls de production, chantiers...**
- Pas convenable dans des endroits très sales et poussiéreux.
- Les flacons ouverts ou liquides résiduels ne doivent pas être réutilisés, du fait du défaut de stérilité probable.

CONDITIONNEMENT

- Carton de 10 flacons
- **Stockage** entre 5 et 35 °C

NORMALISATION

Tous les produits de lavage des yeux PLUM sont **étiquetés CE** conformément à la réglementation sur les **dispositifs médicaux** en vigueur (Directive Européenne 93/42/CEE, classe I) et ils sont stériles afin que l'œil ne soit pas infecté par des germes étrangers pendant le rinçage.

Important !

Quelle que soit la gravité de l'accident, la **pression du liquide** de rinçage doit être douce et continue. Prendre garde de presser les flacons **avec douceur** pendant le rinçage.

La consultation d'un médecin est toujours nécessaire en cas de blessures oculaires. Le rinçage devant se poursuivre jusqu'à l'arrivée du médecin.